

نحوه تعویض کاتریج دستگاه ABG I-SMART

۱- بعد از اینکه کاتریج تمام شد، وارد MENU شده و سپس گزینه REMOVE CARTRIDGE را بزنید و

صبر کنید

۲- سپس درب کاتریج را باز کنید و کاتریج را خارج کنید و سپس کاتریج جدید را مثل کاتریج قبلی در

محل مورد نظر گذاشته

۳- سپس درب کاتریج را بسته و گزینه INSTALL روی صفحه نمایشگر را بزنید و صبر کنید

۴- بعد از گذشت ۱۰ دقیقه و CAL آن، دستگاه آماده استفاده است

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان حضرت فاطمه (س)