



## راهنمای استفاده از دستگاه ساکشن جراحی مدل (Ver 2.0) , (C55f (Ver 1.0)

- \* قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و بدون مطالعه از این وسیله استفاده نکنید.
- \* استفاده از این دستگاه در بخش نوزادان (NICU) ممنوع می‌باشد.
- \* اگر اشکالی در کیسه‌های یکبار مصرف یا محفظه جار مشاهده کردید از آن استفاده نکنید. (C55f-Ver2.0)
- \* جهت روشن نمودن دستگاه، ابتدا دوشاخه رابه برق شهر متصل، سپس کلید اصلی و درنهایت کلید روی دستگاه را فشار دهید.
- \* اگر در هنگام کار با دستگاه مورد غیرعادی مشاهده شد، فوراً کار با دستگاه را متوقف کنید.
- \* جهت ایجاد حداکثر وکیوم، از نصب صحیح اتصالات و شیلنگها و جارها و کیسه‌های یکبار مصرف و عدم وجود نشتی، اطمینان حاصل نمایید.
- \* به منظور حفظ عملکرد شناورها، پس از هر بار تخلیه جار، آنها را به دقت با آب شسته و از سالم بودن واشر سیلیکونی و صحیح قرار گرفتن آن اطمینان حاصل نمایید. (C55f-Ver1.0)
- \* به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به بیمار، وکیوم مورد نیاز را با دقت توسط رگولاتور تنظیم نمایید.
- \* در هنگام توقف ساکشن به دلیل عمل کردن شناور یا Flow stopper در کیسه‌های یکبار مصرف، دستگاه را در این حالت باقی نگذارید و بدون معطلی کیسه را با یک کیسه جدید جایگزین کرده و کیسه قدیمی را امحاء نمایید و یا اینکه نسبت به تخلیه سریع جار اقدام نمایید.
- \* در صورت عدم تخلیه به موقع جارها یا تعویض به موقع کیسه‌های یکبار مصرف امکان ورود مایع به درون دستگاه وجود داشته و این مسأله مشمول گارانتی نمی‌شود.
- \* بیش از ظرفیت جار یا کیسه‌های یکبار مصرف، مایعات زائد را ساکشن نکنید.
- \* جهت جلوگیری از انتشار آلودگی و حفظ سلامت کادر درمانی از فیلتر باکتری به صورت یکبار مصرف استفاده نمایید.
- \* بعد از استفاده از کیسه یکبار مصرف، آن را مانند سایر زباله های عفونی امحاء کنید.
- \* هنگام تخلیه جارها، ابتدا ضامن‌های درب را آزاد نموده، سپس به آهستگی و بدون هیچگونه تنش درب را باز نمایید.
- \* استفاده مجدد از لوازم یکبار مصرف دستگاه نظیر شیلنگ بیمار و فیلتر باکتری و کیسه جمع‌آوری مواد زائد، ممنوع می‌باشد.
- \* جارهای دستگاه را می‌توان به وسیله اتوکلاو در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲۰ دقیقه ضدعفونی نمود ولی جارهای مورد استفاده با کیسه های یکبار مصرف نیازی به اتوکلاو ندارد.
- \* در هنگام تعمیرات یا تعویض فیوزها و در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه آن را از برق شهر جدا کنید.
- \* در صورت مشاهده هرگونه خرابی و اشکال از پاره کردن هولوگرام و دستکاری و یا دمونتاز محصول خودداری کنید.
- \* لوازم جانبی نظیر جارها، درب جارها و شناور را می‌توان با استفاده از مواد ضدعفونی نظیر الکل، ساولون و دکونکس تمیز و ضدعفونی نمود.
- \* در صورت مشاهده افت شدید وکیوم دستگاه، بایستی قطعات دارای طول عمر مفید دستگاه توسط واحد خدمات پس از فروش تعویض گردد.
- \* همیشه از وسایل محافظتی نظیر (دستکش پلاستیکی و ماسک و ...) استفاده نمایید.
- \* جهت اعلام خرابی و یا تأمین لوازم یکبار مصرف با تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

تلفن‌های واحد خدمات پس از فروش ۰۱-۴۵۲۰۲۳۰ (۰۳۱۱)