



## نحوه استفاده

- ۱- شیلنگ اکسیژن را به منبع سانترال یا کپسول وصل کنید.
- ۲- فلوی اکسیژن را بر حسب نیاز بین ۵ الی ۱۰ لیتر بر دقیقه تنظیم کنید.
- ۳- تست لانگ را به دستگاه وصل کنید و قبل از استفاده وجود نشتی را بررسی نمایید.
- ۴- میزان pip لازم را با اتصال تست لانگ به دستگاه چک کنید. توجه کنید میزان pip بیش از  $30 \text{ cmH}_2\text{O}$  نباشد.
- ۵- میزان peep را با استفاده از ولوم (کنار خروجی دستگاه) در جهت عقربه های ساعت تنظیم نمایید.

## ملاحظات کاربری:

۱. استفاده از دستگاه تنها توسط افراد آموزش دیده انجام شود.
۲. حداکثر میزان pip مجاز  $40 \text{ cmH}_2\text{O}$  از سوی سازنده تعیین گردیده است لیکن مقدار بهینه زیر  $30 \text{ cmH}_2\text{O}$  می باشد.
۳. فلوی منبع اکسیژن بین ۵ الی ۱۵ لیتر بر دقیقه قابل تنظیم باشد.
۴. تنظیم pip بر اساس میزان expansion ریه ها انجام شود.
۵. ترجیحا از تیوپ های مختص دستگاه (برند fisher & paykel) استفاده گردد.
۶. این دستگاه تا محدوده وزنی ۱۰ کیلوگرم قابل استفاده است.

## نگهداشت پیشگیرانه:

۱. دستگاه را در محل مناسب قرار دهید از قرار دادن دستگاه در مجاورت دستگاه های حرارتی و برودتی، محل های پرسروصدا، پنجره و نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
۲. برای تمیز کردن دستگاه از پارچه نرم آغشته به آب و صابون و یا ایزوپریل الکل استفاده کنید.
۳. هنگام تمیز کردن دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز جدا کنید.
۴. پس از پایان کار با دستگاه اتصالات را کاملا جدا کرده و در جای خود قرار می دهیم.