


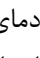
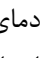
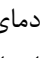


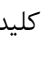



## راهنمایی های عمومی :


- ۱ - دستگاه را در محل مناسب قراردید از قراردادن دستگاه در مجاورت دستگاههای حرارتی و برودتی، محل های پرسر و صدا، پنجره و نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
- ۲ - برای تمیز کردن محفظه دستگاه از الکل استفاده نمایید و برای تمیز کردن آن از سایر مواد ضد عفونی کننده مانند هایژن ، دکونکس و . . استفاده نمایید . برای تمیز کردن سایر قسمت های دستگاه محدودیتی وجود ندارد.
- ۳ - حداقل ۱۰ دقیقه قبل از قراردادن نوزاد در دستگاه ، دستگاه را روشن نموده تا دستگاه به شرایط ثبات حرارتی برسد.
- ۴ - تا حد ممکن از خارج کردن سنسور SKIN خودداری نمایید و برای وصل کردن مجدد آن به آرامی و با دقت سنسور را در محل مربوطه وارد نمایید.
- ۵- در صورت استفاده از رطوبت ، باید از آب مقطر استفاده نمود و بعد از هر بار استفاده، محفظه شستشو و آب آن تعویض شود.
- ۶- در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه با واحد فنی شرکت دنیای طب اندیشان و با شماره های ۴-۸۸۵۱۵۷۶۳ تماس حاصل نمایید.از تعمیر دستگاه توسط افراد غیر متخصص اکیدا خودداری نمایید.

## راهنمای استفاده از دستگاه :

- ۱ - با استفاده از کلید Power ( کنار دستگاه )، دستگاه را روشن نمایید .
- ۲ - در این مدل امکان تنظیم پارامترهای دمای محفظه و دمای بدن نوزاد وجود دارد .
- ۳ - در این انکوباتور با انتخاب هر حالت ( Mode ) دستگاه ، نمایشگر دمای همان حالت ( Mode ) را نمایش می دهد .
- ۴ - برای تنظیم هر پارامتر باید چراغ دکمه  و چراغ پارامتر مورد نظر همزمان روشن باشد.
- ۵ - با فشردن کلید  و سپس  نمایشگر دستگاه در حال چشمک زدن ، در حالت Air ، دمای ۳۲C درجه را نشان می دهد با استفاده از کلیدهای  و  دمای مورد نظر را انتخاب کنید و سپس کلید  را برای تأیید تنظیم فشار دهید.
- ۶ - برای تنظیم حالت skin ابتدا کلید  و سپس  را فشار دهید ، با استفاده از کلید های  و  دمای مورد نظر را انتخاب و با کلید  آن را تایید نمایید.
- ۷- دستگاه را روی هر مورد قرار دهیم ، نمایشگر Real temp دمای آن حالت ( Mode ) و نمایشگر Auxiliary (جانبی ) دمای حالت ( Mode ) دیگر را نشان می دهد.
- ۸- در صورت نیاز نداشتن به دستگاه با استفاده از کلید Power دستگاه را خاموش کنید.

## پیامهای خطای دستگاه

|              |   |
|--------------|---|
| روشن شدن LED | علت آلارم   |
| POWER        | سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه   |
| FAN          | مشکل Fan یا بالا رفتن غیر عادی دمای اطراف فن  |
| SENSOR       | Sensor ، Skin یا Air مشکل دارد  |
| OVERHEAT     | دمای محفظه بالاتر از ۳۸ درجه است  |
| DEVIATION    | ایجاد اختلاف دما بین میزان واقعی و مقدار تنظیم شده (±۲) به دلیل عوامل محیطی یا خرابی دستگاه |
| SYSTEM       | با واحد فنی شرکت دنیای طب اندیشان تماس بگیرید   |

- آلارم های صوتی توسط کلید  غیر فعال می شود، چراغ مربوط به آلارم در صورت بر طرف شدن مشکل خاموش می شود. در صورت برطرف نشدن مشکل پس از ۵ دقیقه مجددا آلارم صوتی فعال می شود .