


نحوه اتصال کمرآهد به کنسول کمرآ

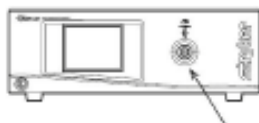


- درپوش محافظ آب را باز کرده و فلش آبی رنگ روی کمرآ هد را رویروی فلش مشخص شده روی کنسول قرار داده و کمرآ را به کنسول متصل نمایید.

استفاده از دکمه های روی کمرآ هد




- **W**: طبق تنظیمات کمپانی با نگه داشتن این دکمه به مدت ۲ ثانیه عمل **white balance** انجام می شود.
 - با استفاده از این دو دکمه می توانید طبق تنظیم دلخواه خود نور یا زوم تصویر را زیاد یا کم نمایید.
 - این دکمه برای کنترل دستگاههای اینترگریشن و ملحقات سیستم لایپاروسکوپی از روی کمرآهد طراحی شده است.
- اخطار:** از تا کردن و ایراد فشار به کابل کمرآ جدا خودداری فرمایید و دقت فرمایید کمرآ و کابل آن را در مجاورت اشیا تیز و برنده قرار نداشته باشد.
- اخطار:** کمرآی 1288HD قبل اتوکلاو نبوده و از اتوکلاو آن با بخار جدا خودداری فرمایید. استفاده از اتاور کمرآ یا محلول های ضدعفونی مناسب ترین راه برای استفاده از کمرآی 1288HD می باشد.

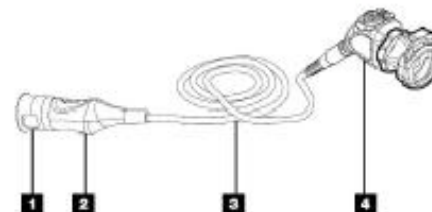

۱. درپوش ضد آب: این درپوش از سوکت های محل اتصال به کنسول در برابر رطوبت در زمان شستشو و ضدعفونی محافظت می نماید.
۲. کابل اتصال: با استفاده از این پورت کمرآ هد به کنسول کمرآ متصل می گردد.
۳. کابل کمرآ
۴. کمرآهداین وسیله تصاویر را دریافت و برای کنسول کمرآ ارسال می کند. کمرآ هد همچنین محل قرار گرفتن دکمه های کنترل و اتصال کوپلر برای فوکوس تصویر می باشد.

کوپلر

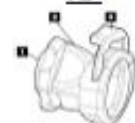


۱. محل اتصال به کمرآ هد
۲. حلقه فوکوس
۳. کلمپ برای محکم نگه داشتن لنز در داخل کوپلر
۴. محل قرار دادن EYEPIECE لنز

نحوه اتصال کوپلر به کمرآهد



- برای باز کردن یا بستن کوپلر روی کمرآ حتما کوپلر را از محل اتصال به کمرآ (قسمت ۱) گرفته و از چرخاندن و ایراد فشار به سایر قسمتهای کوپلر خودداری فرمایید. برای بستن کوپلر روی کمرآ هد آن را در جهت عقربه های ساعت چرخانید.

نحوه اتصال لنز به کمرآهد

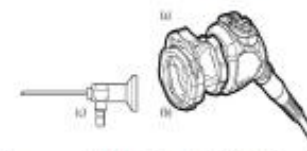

- برای ورود لنز ابتدا کلمپ ۳ را به پایین فشار داده و **eyepiece** لنز را در قسمت ۲ قرار دهید و سپس کلمپ را رها نمایید.