





طریقه استفاده از دستگاه انکوباتور مدل ۱۱۱

- دستگاه را توسط کلید  روشن کنید. در این حالت تنها قسمت کنترل هوای داخل محفظه فعال می‌گردد. با کلیدهای   دمای داخل محفظه را تنظیم کنید. دمای داخل محفظه پس از ۳۰ دقیقه به حالت پایدار درمی‌آید.
- در حالت کنترل دمای داخل محفظه اگر نیاز به دمای بیش از ۳۷ درجه باشد می‌توانید با فشار دادن دکمه  دما را تا ۳۹ درجه تنظیم نمایید. در این حالت هشدار نوری نشان دهنده حالت ویژه، فعال می‌گردد.
- در صورت نیاز به کنترل دمای بدن نوزاد، دکمه  را فشار دهید تا قسمت کنترل دما توسط حسگر پوستی فعال گردد. در این حالت می‌توانید با دکمه‌های   دمای داخل محفظه را تنظیم نمایید. در صورتی که حسگر پوستی به بدن نوزاد متصل باشد نمایشگر، دمای بدن نوزاد را نشان می‌دهد.
- اگر نیاز به تنظیم رطوبت داخل محفظه باشد، ابتدا کشوی منبع آب رابه سمت بیرون بکشید و منبع آب را به آرامی خارج کنید و آن را با آب مقطر پر کرده و در جای خود به طوری که سوپاپ آن در محل خود قرار گیرد قرار دهید. کلید فعال سازی قسمت رطوبت را فشار داده و درجه رطوبت نسبی را با کلیدهای   تنظیم نمایید. نمایشگر، درصد رطوبت داخل محفظه را نشان می‌دهد.



هشدار

- **SENF:** اگر در مدار حسگر اختلالی بوجود آید این هشدار فعال می‌گردد.
- **Overheat:** اگر دمای حس شده توسط حسگر دما بیش از ۳۹/۳ شود، این هشدار فعال می‌گردد.
- در صورتیکه ۳۰ دقیقه، پس از تنظیم کردن دستگاه دمای داخل محفظه و دمای تنظیم شده به وسیله کاربر بیش از ۲ درجه باشد، هشدار A.S.D فعال می‌گردد با فشار دادن کلید **A.S.D** نیم ساعت دیگر به دستگاه فرصت تنظیم دما می‌دهد.
- **F.F:** در صورت از کار افتادن فن این هشدار فعال می‌گردد، و سیستم گرم کننده از کار می‌افتد.
- حسگر دما را روی شکم نوزاد (در ناحیه کبد) قرار دهید و از چسب ضد حساسیت استفاده نمایید و همچنین از قرار دادن حسگر پوستی در مقعد نوزاد اجتناب شود.
- اگر دمای بدن نوزاد (در صورتی که حسگر پوستی به بدن نوزاد متصل باشد) بیش از ۳۸.۵ درجه شود Overheat فعال می‌شود.
- در صورت خالی بودن منبع آب، هشدار L.W فعال می‌گردد.
- در صورت خالی بودن باتری پشتیبانی چراغ پاور چشمک می‌زند.
- دستگاه باید هر ۶ ماه یکبار توسط نمایندگان مجاز خدمات توسان، سرویس و کالیبره گردد.