



## «دستورالعمل مراحل تعویض فیلتر دیاسیف دستگاههای دیالیز فرزنیوس 4008S»

- ۱) دستگاه دیالیز را روشن کرده و دکمه Cleaning را فشار دهید.
- ۲) گزینه Change Filter را انتخاب کنید.
- ۳) روی صفحه پیغام Emptying Filter نمایش داده می شود.
- ۴) منتظر باشید تا پیغام Filter Changed? روی صفحه نمایش داده شود.
- ۵) کاور روی فیلتر دیاسیف دستگاه را جدا کنید.
- ۶) اهرم های آبی رنگ را به سمت بالا تغییر وضعیت داده تا به حالت  $90^{\circ}$  برسند.
- ۷) فیلتر را به صورت کشویی به سمت بالا بکشید.
- ۸) فیلتر جدید را از کاور باز کرده و تاریخ تعویض را بر روی برچسب «نارنجی رنگ» داخل جعبه نوشته و بر روی فیلتر بچسبانید.
- ۹) فیلتر جدید را به همان صورت کشویی به سمت پایین جاگذاری کنید.
- ۱۰) اهرم های آبی رنگ را به وضعیت اولیه تغییر دهید تا فیلتر ثابت شود.
- ۱۱) کاور روی فیلتر را مجدداً نصب نمایید.
- ۱۲) کلید Confirm را فشار دهید.
- ۱۳) روی صفحه پیغام Filling Filter نمایش داده می شود.
- ۱۴) نصب فیلتر به اتمام رسیده و ماشین به صورت اتوماتیک منوی شستشو را نمایش می دهد.
- ۱۵) برنامه Disinfection را انتخاب کنید و منتظر باشید تا شستشو به انتها برسد.