




❖ برای جابجا کردن تخت می توان با حرکت پدال مشخص شده به سمت پایین، تخت را از روی پایه به روی چرخ منتقل و براحتی جابجا نمود.

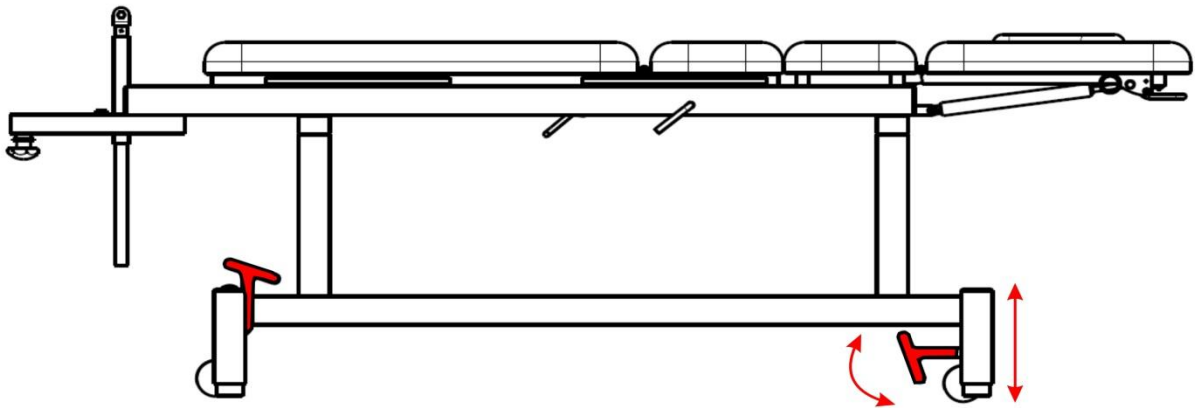


❖ نحوه اتصال استند به دستگاه ترکشن به صورت شکل زیر می باشد. جهت محکم کردن پیچ ها از آچار آلن استفاده نمایید.

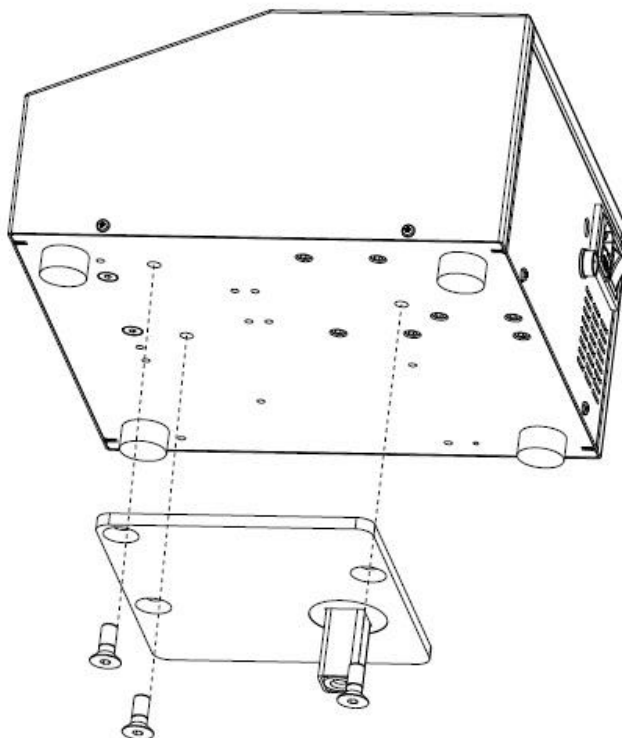


- ❖ برای نصب دستگاه بر روی پایه تخت، سه حالت وجود دارد. دقت شود همواره پانل دستگاه رو به کاربر یا در امتداد تخت قرار گیرد. (پانل رو به دیوار نباشد). پس از نصب دستگاه پیچ دستی زیرین دستگاه به پایه محکم شود.

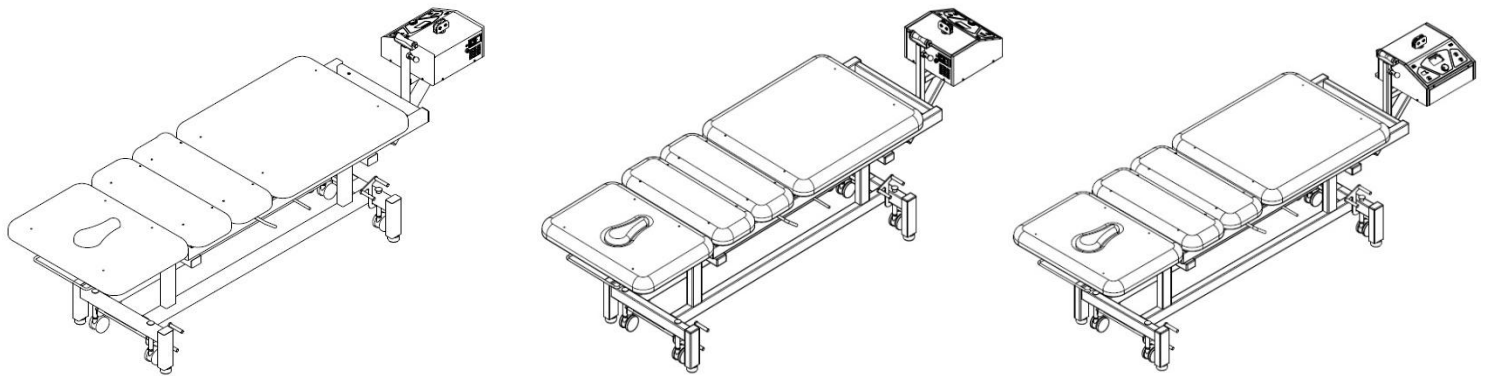


- ❖ جهت تنظیم ارتفاع میله راهنمای طناب لازم است اهرم میله را کشیده و پس از تنظیم ارتفاع اهرم را رها نمایید. از آنجائیکه معمولاً یک طرف تخت رو به دیوار قرار می گیرد. پیشنهاد می شود اهرم تنظیم ارتفاع میله را همواره به سمت کاربر باشد. (به طرف دیوار نباشد).

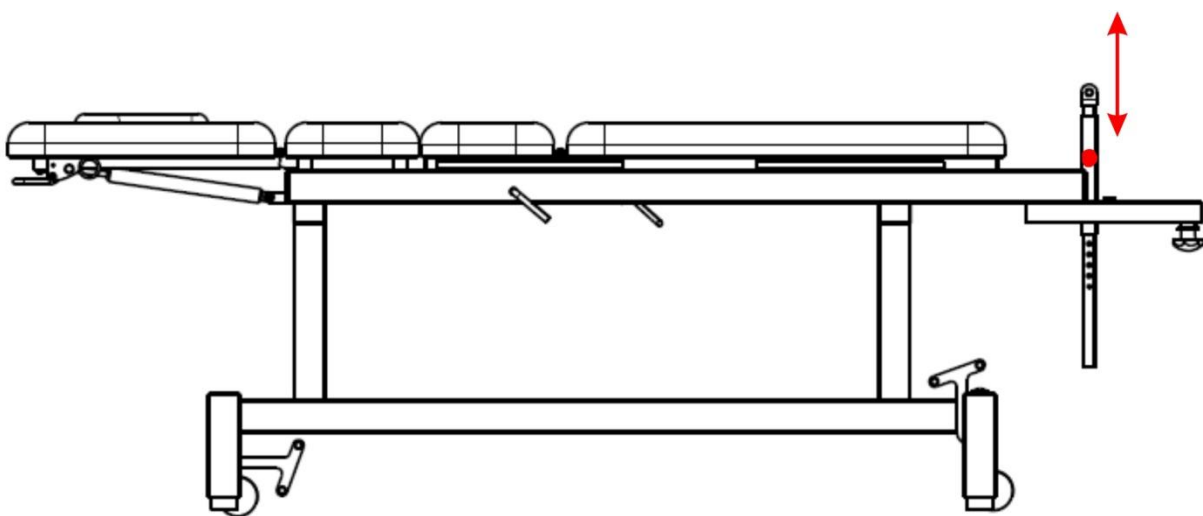


- ❖ جهت تنظیم زاویه **Head Section** لازم است اهرم مربوطه را در جهت نشان داده شده حرکت دهید و زاویه دلخواه را تنظیم نمایید. ( - 50 to + 70 )

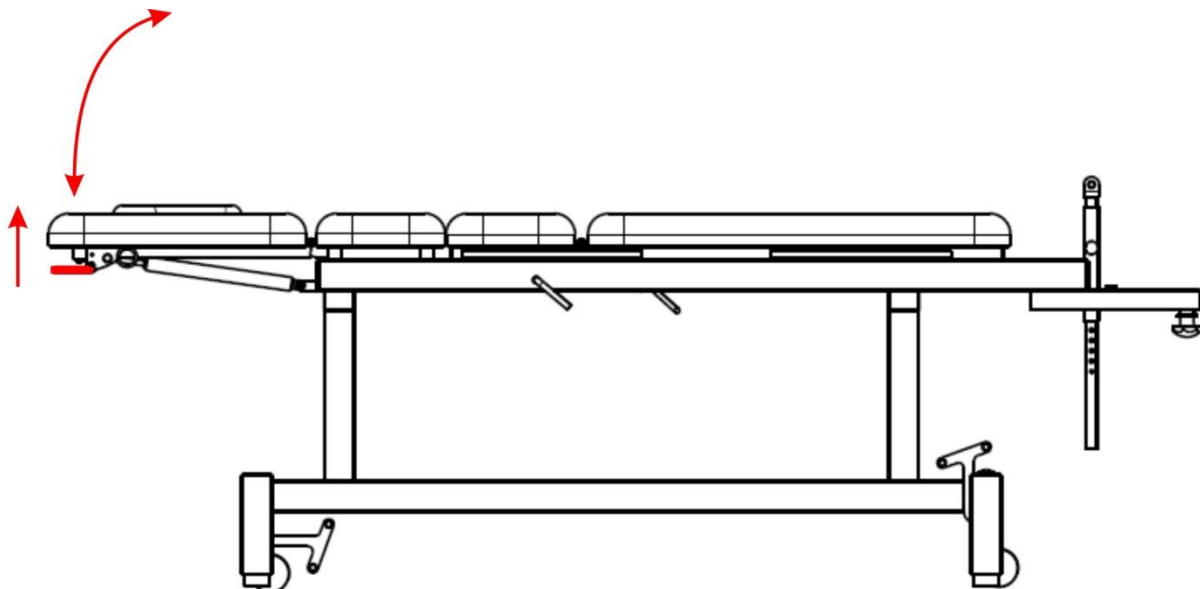

- ❖ جهت تنظیم زاویه **Foot Section** لازم است اهرم مربوطه را در جهت نشان داده شده حرکت دهید و زاویه دلخواه را تنظیم نمایید. ( 0 to +87 )

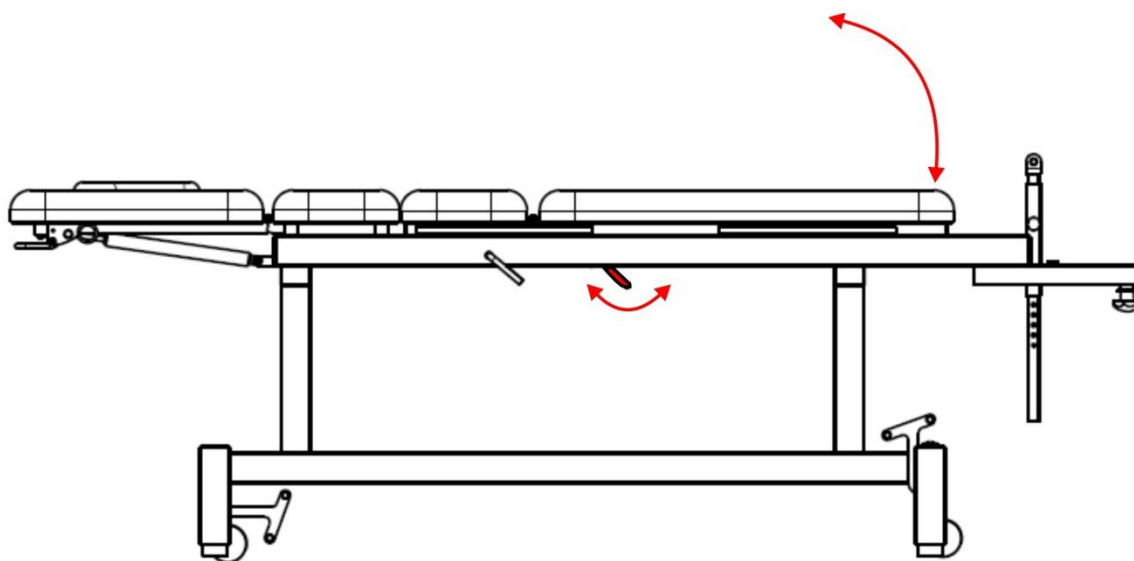


❖ باتوجه به اینکه قسمت کمربندی قابلیت جابجایی در طول را دارد، جهت ثابت نگهداشتن **Foot Section** اهرم دستگیره ترمز را در جهت نشان داده شده حرکت دهید در این صورت ترمز عمل کرده و **Section** قفل می شود.

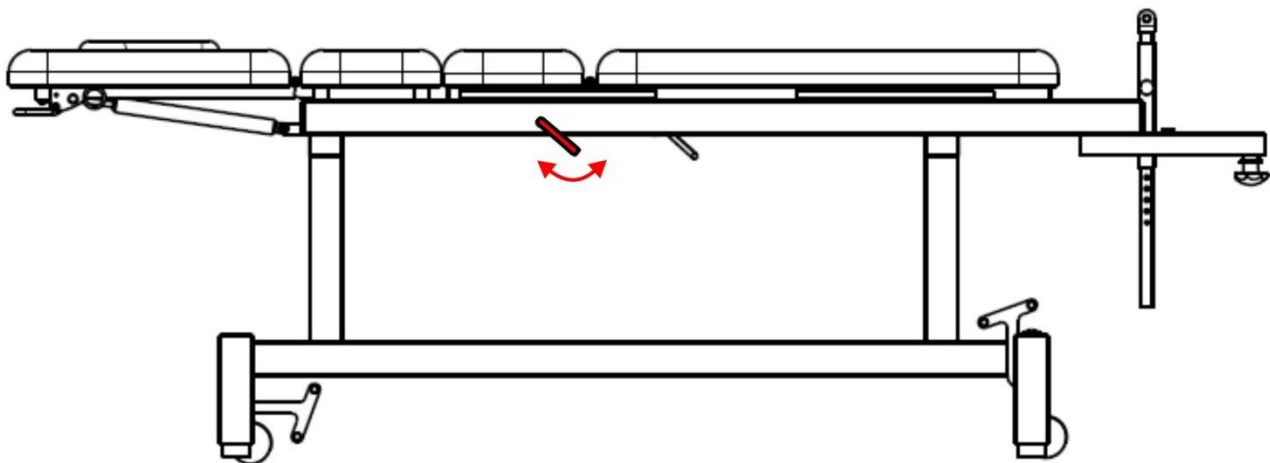


❖ در صورت نیاز به اعمال کشش گردن، میله راهنما را مطابق شکل به هم متصل نمایید.

توجه شود طناب دقیقا از روی قرقره ها عبور داده شود. همچنین به نحوه قرار گرفتن قرقره ها و جهت آن ها توجه شود.

(شکل ۲)

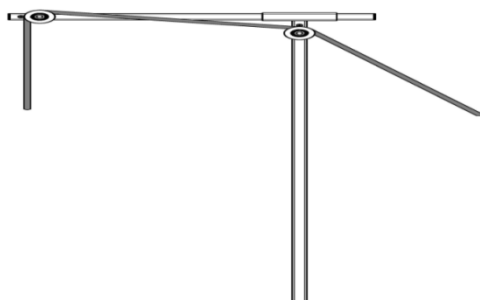

(شکل ۱)

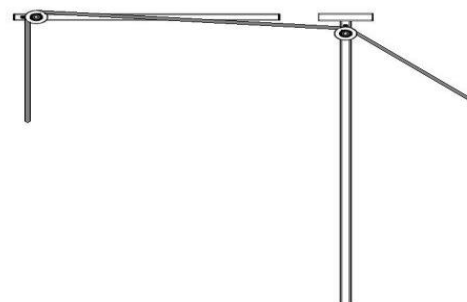

**توجه :** توصیه می گردد برای ضد عفونی کردن سطح تخت از محلول هایی با درصد حجمی الکل کمتر از ۴۰٪ استفاده شود.