

# دستور العمل استفاده از دستگاه آندوسکوپ شوی

۱. با استفاده از کلید **Power** دستگاه را روشن نمائید .
۲. در صورت مشاهده آلام **Disinfect** دستگاه را از مواد ضد عفونی پر کنید .
۳. در صورت مشاهده آلام **Detergent** دستگاه را از ماده شوینده پر کنید .
۴. تاریخ انقضای مواد ضد عفونی داخل دستگاه را چک کنید . در صورت پایان انقضاء ، مواد را خالی کرده و مواد جدید را جایگزین کنید .
۵. درب دستگاه را باز کرده و فیبر آندوسکوپ را بگونه ای داخل سینک قرار دهید که قسمتهای بزرگ چشمی یا ویدئویی در قسمت عمیق تر قرار گرفته و ادامه فیبر را به دور نازل گردان بچرخانید .
۶. با استفاده از کانکتور شستشوی کانال داخلی ، دستگاه را به شلنگ شستشو اتصال دهید و شلنگها را بر روی کانکتور محکم نمائید تا در حین شستشو خارج نشوند .
۷. درب دستگاه را بسته و تایم شستشوی **Wash** و تایم ضد عفونی **Disinfect** را تنظیم کرده و کلید **Start** را بزنید .
۸. پس از پایان کار دستگاه آلام شنیداری بمدت **۱** دقیقه شنیده خواهد شد و چراغ **End** روشن خواهد ماند .
۹. انتخاب تایمهای ضد عفونی و شستشو بر اساس آلودگی فیبر و همچنین دستورالعمل ماده ضد عفونی توسط کاربر باید تنظیم شود .
۱۰. از شستن دستگاه با شلنگ آب جداً خودداری کرده و برای تمیز کردن از دستمال آغشته به ماده ضد عفونی استفاده شود .
۱۱. درب دستگاه را درحین کار باز نکنید .
۱۲. در صورت مشاهده هرگونه مشکل با واحد خدمات پس از فروش شرکت توسن تجهیز به شماره ۰۲۱-۲۲۳۳۵۱۵۲ تماس حاصل فرمائید .