


راهنمای استفاده سریع از دستگاه پانورکس دیجیتال شرکت مهندسی آرین درمان پژوه

تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۰۷۷۳۰ فاکس : ۰۲۱-۸۸۹۰۳۷۴۷ شماره تلفن همراه ریموت : ۰۹۲۲۰۹۲۱۶۱۰

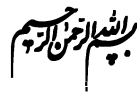

این دفترچه جهت راهنمای استفاده سریع از دستگاه پانورکس دیجیتال Vatech مدل PCH-2500 تهیه شده است .

جهت تسریع در خدمات لطفا قبل از تماس با کارشناسان شرکت ابتدا از اتصال اینترنت به سیستم خود مطمئن شده و نرم افزار

ANY DESK را اجرا کرده و ID آنرا یادداشت کنید.

لطفا جهت ارائه خدمات بهتر از اینترنت پر سرعت استفاده نمایید .

هنگام اتصال اینترنت از طریق شبکه ، IP کارتهای شبکه را یادداشت و بخاطر داشته باشید کابل شبکه اینترنت باید به کارت شبکه

ON BOARD متصل شود.

استفاده از گوشی همراه جهت اتصال به اینترنت :

۴ – TETHERING AND MOBILE HOTSPOT

۱- اتصال گوشی همراه به پورت USB از طریق کابل

نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت

۲- فعال کردن اینترنت گوشی همراه

۵ – USB TETHERING (اتصال USB)

۳ – SETTING (تنظیمات)


پس از انجام مراحل فوق اینترنت سیستم کامپیوتری متصل می گردد.

راه اندازی دستگاه:

- با زدن دکمه On/Off سبز رنگ زیر بازو، دستگاه را روشن نمایید.
- کامپیوتر را روشن کنید.
- از عملکرد صحیح قسمت مکانیکی اطمینان حاصل فرمایید.

آموزش سریع نرم افزار EzDent-i:

- جهت ورود به نرم افزار روی آیکون EzDent-i کلیک کنید.

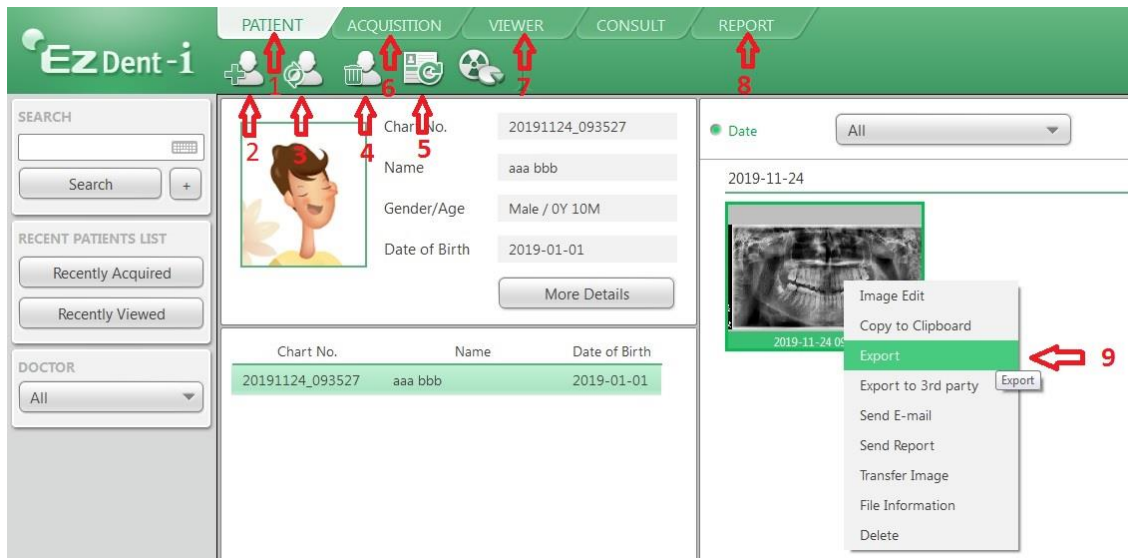

۱. منوی پذیرش بیمار و آرشیو تصاویر
۲. معرفی کردن بیمار جدید
۳. ویرایش اطلاعات بیمار
۴. حذف بیمار
۵. مخفی کردن اطلاعات بیمار از منوی Patient
۶. منوی ورود به صفحه گرفتن تصویر
۷. منوی پردازش تصاویر
۸. منوی پرینت
۹. گزینه Export جهت رایت سی دی

- گزینه ۲ (Add Patient) را بزنید و بیمار جدید را ثبت کنید.

- وارد منوی ۶ (ACQUISITION) شوید و گزینه PANORAMA را انتخاب کنید تا صفحه اکسپوز باز شود.




- در صفحه اکسپوز شرایط تابش را تنظیم کنید و دکمه CONFIRM را بزنید و به بیمار پزیشن بدهید.

- بعد از اتمام پزیشن دکمه READY را بزنید. صبر کنید تا چراغ سبز روی هندسویچ روشن شود سپس اکسپوز نمایید.

- از ۵ تا تصویر نمایش داده شده تصویر مناسب را انتخاب کنید و SAVE نمایید.

- در نرم افزار EZDent-i وارد منوی ۷ (VIEWER) شوید و با استفاده از دکمه های مربوطه تصویر را پردازش و یا کراپ نمایید.

- وارد منوی ۸ (REPORT) شوید و چیدمان تصاویر را انجام دهید.

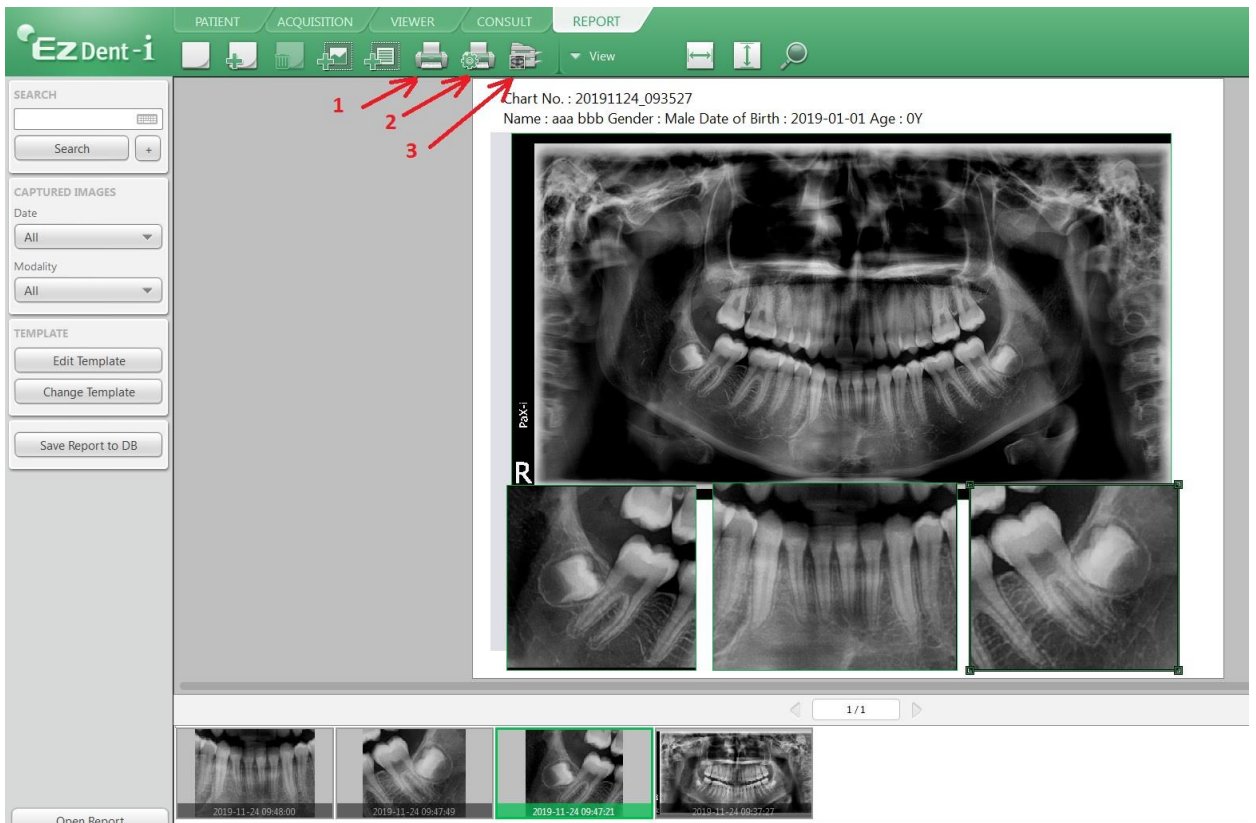

۱. پرینت کاغذی

۲. تنظیمات پرینت (شامل انتخاب سائز فیلم و ...)

۳. پرینت

- دکمه ۳ (DICOM Print) را بزنیید و پرینتر را انتخاب کنید سپس تصویر را پرینت نمایید.