


درپ دستگاه  
 انورم خدایی

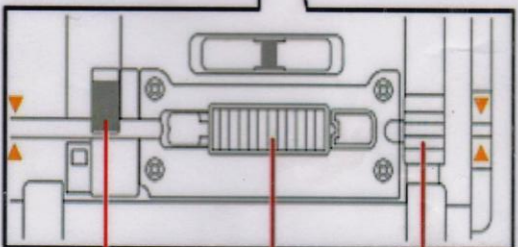

حسگر تشخیص حباب هوا  
 مکانیکی  
 گروه نگهدارنده لوله سرم

## راه اندازی سریع دستگاه اینفیوژن پمپ اتم مدل P-600U :

- دستگاه را روشن کنید.
  - درب دستگاه را باز کرده کلید **PUSH** را کنار بزنید و پس از جایگذاری ست در مملی که با فلش نارنجی رنگ مشخص شده است و انجام هواگیری، درب دستگاه را ببندید.
  - برای تعیین سرعت تزریق دارو کلید **RATE** را فشار داده و مقدار آنرا وارد نمایید.
  - برای تعیین مهم تزریق کلید **VTBI** را فشار داده و مقدار آنرا وارد نمایید و سپس دکمه **START** را جهت شروع تزریق فشار دهید.
  - با فشردن کلید << میتوانید مساسیت دستگاه نسبت به انسداد را در 5 سطح و با استفاده از کلید های + و - تنظیم نمایید. (توجه داشته باشید سطح 1 مساسیت بیشتر و سطح 5 مساسیت کمتر میباشد).
  - پس از پایان تزریق، آلام **COMPLETE** بصدا در می آید.
- هشدار: از نفوذ مایع به درون دستگاه جداً جلوگیری فرمائید.**

### آلام ها :

- AIR IN LINE** : در مسیر ست سرم، هوا وجود دارد.
- OCLUSION** : مسیر تزریق به هر دلیلی مسدود شده است.
- LOW BATT** : انرژی ذخیره شده در باتری دستگاه کافی نیست.
- NO OPERATIONS** : دستگاه بیش از یک دقیقه در حالت Standby قرار گرفته است.
- COMPLETE** : عملیات تزریق با موفقیت پایان یافته است.
- DOOR OPEN** : در زمان شروع تزریق درب دستگاه باز میباشد.

شماره تلفن تماس با واحد خدمات پس از فروش : 021-88069794 ، داورنگار : 021-88069795