



طریقه استفاده از دستگاه فتوترا بی ۰۲۵-۰۲۴-۰۲۲

- دو شاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید درب دستگاه را به آرامی باز کرده. کنترل کنید که تشک در جای خود قرار گرفته باشد.
- حسگر پوستی را به محل خود در کنار دستگاه وصل کرده و سر آن را داخل محفظه قرار دهید.
- کلید  Power را فشار دهید، در این صورت سیستم تهویه هوای دستگاه شروع به کار می‌کند و نمایشگر LCD روشن می‌شود.
- برای روشن کردن لامپها ابتدا با کلیدهای   زمان لازم برای نور درمانی را تنظیم نمایید. زمان تنظیم شده روی نمایشگر نشان داده می‌شود.
- نوزاد را به آرامی روی تشک دستگاه قرار داده و سنسور پوستی را روی شکم نوزاد در ناحیه کبد قرار دهید.
- به آرامی درب دستگاه را بسته و کلید  را جهت شروع نور درمانی فشار دهید.
- نمایشگر، زمان سنج نور درمانی، عمر لامپها، دمای داخل محفظه و دمای بدن نوزاد را نشان می‌دهد. زمان سنج نور درمانی و زمان سنج عمر لامپها به صورت معکوس عمل می‌کند.
- اگر در حین نور درمانی احتیاج به بازرسی نوزاد داشته باشید کلید  را فشار دهید تا لامپها خاموش شده، در این حالت مابقی زمان نور درمانی متوقف شده و با لمس دوباره کلید  لامپها روشن شده و زمان سنج نور درمانی فعال می‌گردد.
- هنگام به پایان رسیدن زمان نور درمانی لامپها خاموش شده و دستگاه پایان نور درمانی را با هشدار صوتی اعلام می‌کند.
- در صورتیکه دمای داخل محفظه بیش از ۳۹/۳ درجه باشد، هشدار نوری و صوتی فعال می‌گردد.



● در صورت اختلال در مدار سنسور هوا و سنسور پوستی نمایشگر دستگاه هشدار نوری می‌دهد.

هشدار

- در زمان نور درمانی برای محافظت از چشم نوزاد، از چشم بند نوزاد استفاده شود.
- هیچگاه دستگاه را در معرض یا مجاورت گازهای قابل اشتعال و یا داروها و مواد تخریبی قرار ندهید.
- اندازه گیری مرتب دمای بدن نوزاد الزامی است.
- از نگاه کردن مستقیم به نور دستگاه فتوتراپی اجتناب نمایید.
- در هنگامیکه دستگاه روشن است آنرا حرکت ندهید، یا حداقل ۱۰ دقیقه قبل از حرکت دادن آن، دستگاه را خاموش نمایید.
- هیچگاه دستگاه را در مجاورت وسایل گرمایشی یا برودتی و یا تابشی مستقیم نور خورشید قرار ندهید.
- استفاده از شورت و چشم بند هنگام نور درمانی توصیه می‌شود.
- از فشار آوردن اجسام نوک تیز روی پنل (صفحه کلید) اجتناب کنید.