

Stryker Formula Shaver & Formula 180 Handpieces Quick Guide



اتصال کابل هندپیس به کنسول:

نشانه قرمز در Connector کابل را در محل اتصال کنسول روبرو کرده و به آرامی Connector کابل را در محل اتصال کنسول فشار دهید تا کاملاً جفت شود.

توجه: جهت باز کردن کابل از کنسول، نزدیکترین قسمت کانکتور به دستگاه Core را گرفته و با دست دیگر دستگاه را مهار کرده و کانکتور را به عقب بکشید تا از محل اتصال کنسول جدا گردد.

توجه: جهت جدا کردن کابل هندپیس از کنسول از کشیدن کابل و یا چرخاندن کانکتور خودداری نمائید. جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای سریع دستگاه Core مراجعه شود.

نحوه نصب تیغه:

تیغه شیور انتخابی را در هندپیس قرار دهید و با روبرو قرار دادن علامت فرورفتگی در آن با نشانه روی قفل کننده آن در هندپیس فشار دهید تا قفل شود. (حتماً مطمئن شوید که قفل شده است)

جهت باز کردن تیغه شیور، قفل کننده تیغه (Collar) را فشار دهید و سپس تیغه را خارج کنید.

شماره دکمه	تنظیم Default
۱	فعال کننده Hand Piece Main Trigger
۲	تبدیل از حالت نوسانی به حالت چرخشی و بالعکس High / Low <> OSC
۳	تغییر جهت چرخش Forward <> Reverse

نکات ایمنی:

- در صورت استریل به روش اتوکلاو قبل از استفاده از هندپیس صبر کنید تا بدنه آن خنک شود و هیچ گاه از آب جهت خنک کردن آن استفاده نکنید و اجازه دهید که هم دمای محیط گردد.
- تیغه های شیور یکبار مصرف می باشند و از استفاده مجدد از آنها پرهیز گردد.
- قبل از شستشو، تیغه شیور و شیلنگ Suction را باز کنید
- پس از عمل کابل هندپیس را از کنسول جدا کنید و درپوش آن را نصب کنید.
- مراحل شستشو و استریل کردن دقیقاً مطابق با دفترچه راهنما و با مواد و غلظتهای توصیه شده انجام گردد.
- پس از استریل هندپیس باید هیچ گونه رطوبتی در آن ، به ویژه Connector کابل آن نمانده باشد.



داهی طب

نماینده انحصاری محصولات کمپانی استرایکر در ایران

شرکت داهی طب (نماینده انحصاری محصولات استرایکر)

خیابان وزراء، خیابان ۳۳، شماره ۱۸

کد پستی: ۱۵۱۶۶۵۱۱۱

تلفن: ۸۸۷۷۸۱۱۱

نمابر: ۸۸۷۷۸۱۱۲

<http://www.dahiteb.com>

Stryker Core2 Console Quick Guide



- کنسول را در مکان صاف و محکم قرار دهید.

کابل برق دستگاه را به قسمت پشت کنسول وصل نمایید.
انتهای کابل برق را به پریز اتاق عمل وصل نمایید. حتی الامکان از سیم رابط استفاده نشود.
کنسول را روشن نمایید (کلید on/off در جلوی کنسول تعبیه شده است).
توجه: زمانیکه سیستم Setup میشود، صفحه کنسول جهت نشان دادن قطعات متصل به آن تغییر خواهد کرد.

- از چرخاندن کانکتورهای هندپیس و پدال درون سوکت کنسول خودداری نمایید. کانکتورها فشاری بوده و تمامی کانکتور ها و سوکتها دارای نقطه های مارکر می باشند.
- اگر از Core Universal Handswitch استفاده مینمایید قبل از اتصال هندپیس به کنسول آنرا به هندپیس متصل نمایید.
- اگر از Footswitch استفاده می شود، سیستم مربوطه را به کنسول متصل کنید.
- کابل هندپیس را به قسمت مشخص شده کنسول وصل نمایید.
- جهت هر هندپیس با توجه به نوع آن پنجره ای باز خواهد شد که فرد آموزش دیده از طریق صفحه تاج میتواند سرعت و جهت حرکت موتور را تنظیم نماید.
- تذکر: در صورتی که از کنسول پمپ ابریگیشن (آپشنال) استفاده می کنید جزوه آموزشی نحوه اتصالات را از کارشناسان کمپانی دریافت نمایید.

نحوه نگهداری و نظافت کنسول، کابل برق و پدال:

- هرگز کابل برق و کنسول را استریل نکنید.
- از وارد شدن رطوبت به کابل (و کانکتور کابل) و کنسول و پدال جلوگیری نمایید
- از اسپری کردن مواد شوینده به صفحه نمایشگر کنسول پرهیز نمایید.
- جهت نظافت توسط یک پارچه نرم مانند گاز دارای رطوبت کنسول، کابل و پدال را تمیز نمایید
- امکان تعمیر دستگاه در مرکز وجود ندارد بنابراین هنگام خرابی دستگاه با هماهنگی شرکت آنرا به شرکت ارسال نمایید.
- از یک پریز برق جدا برای کنسول استفاده نمایید.



داهی طب

نماینده انحصاری محصولات کمپانی استرایکر در ایران

شرکت داهی طب (نماینده انحصاری محصولات استرایکر)

تیایان و زراء، خیابان ۳۳، شماره ۱۸

تد پستی: ۱۵۱۶۶۵۵۱۱۱

لفن: ۸۸۷۷۸۱۱۱

مابر: ۸۸۷۷۸۱۱۲

<http://www.dahiteb.com>