

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	<p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود</p>	
بخش: آزمایشگاه	<p>دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه سل کانترسیسمکس</p>	
<p>پس از قرار دادن نمونه در زیر پیپت دکمه سبز Start را فشار دهید و به محض شنیدن ۲ بوق ممتد و یا پر رنگ شدن مثلث اول و یا تبدیل شدن نوشته Aspiration به نوشته Analyzing نمونه را از زیر پیپت خارج نمایید. دقت شود تا به دلیل تعجیل در خارج کردن ظرف نمونه آسیبی به پیپت وارد نشود. نتایج پس از مدتی روی صفحه ظاهر میشود و در صورت فعال بودن پرینتر چاپ میشود و سپس دستگاه مجدداً وارد مرحله Ready میشود.</p> <p>ذخیره اطلاعات: در برنامه Select تمامی اطلاعات ذخیره شده امکان تغییر شماره نمونه و انتخاب به منظور حذف و یا چاپ مجدد در این برنامه وجود دارد. با زدن دکمه Enter روی شماره بیمار مورد نظر در حالت انتخاب شده قرار میگیرد دو گزینه در پایین صفحه به عنوان 10 Delet و یا 20 Print ظاهر میشود که امکان حذف یا پرینت مجدد میدهد.</p> <p>توجه توجه: روزانه حتما Shut down انجام شود. اقدام هفتگی هر شبه حتماً سینی SRV تمیز گردد کافیت یکبار با آب شسته شود و با گاز معمولی خشک شده و دوباره جایگذاری شود. دقت شود هنگام جایگذاری لوله های SRV خم یا بسته نشود.</p> <p>نکته در مورد محلولهای مصرفی: باقیمانده محلولهای ایزوتون و لایز روی محلول جدید ریخته نشود. در مورد تعویض محلولها ۱- در تعویض لایز: انتخاب Asp reg 1- از برنامه Help (در صورت اتمام) در صورتی که به هر علتی پیش از اتمام لایز تصمیم به تعویض آن گردد باید برنامه select 4 انجام شود ۲- در تعویض ایزوتون نیز در صورت اتمام به همان روش و در صورت تمایل اثراتر به هر علت برای تعویض لایز برنامه select 5 انجام میشود.</p>		