



پنل جلویی

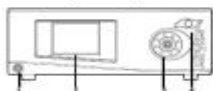

1. دکمه پاور
2. صفحه لمسی
3. کلمپ کابل: محل اتصال کابل نور سرد
4. گیره باز کننده کلمپ: باز کننده کلمپ نگه دارنده کابل نور قبل از اتصال کابل نور سرد

پنل پشتی

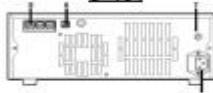

5. کانکتور SFB جهت اتصال با سایر تجهیزات استرایکر

6. پورت SIDNE جهت اتصال به سیستم اتاق عملهای یکپارچه استرایکر

7. اتصال زمین

8. کانکتور برق AC جهت اتصال به برق AC

9. کانکتور SFB جهت اتصال با سایر تجهیزات استرایکر

نحوه اتصال کابل نور سرد به دستگاه



1. گیره باز کننده کلمپ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا منوقت گردد در این حالت کلمپ نگه دارنده کابل نور باز می شود.



2. انتهای کابل نور سرد را به درون کلمپ وارد کنید تا هاشم عمل کرده و کابل را محکم نگه دارد.
3. دقت نمایید کابل نور سرد حتما غیر رسانا و تمیز و خشک باشد.
4. برای جدا کردن کابل نور سرد از دستگاه گیره را مجدداً در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کلمپ باز و کابل نور آزاد گردد.

- **اختلاف:** انگشت خود را از داخل پورت و کلمپ نگه دارنده دور نگه دارید.
- **اختلاف:** هرگز در پیچ های تهیه روی پنل دستگاه را نبوشانید.
- **اختلاف:** هرگز به نور ساطع شده از دستگاه در انتهای کابل نور سرد مستقیماً نگاه نکنید. شدت نور ممکن است باعث آسیب چشمان شما گردد.