




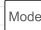





طریقه استفاده از دستگاه وارمر سرو مدل ۰۵۲

- دستگاه را با کلید  روشن کنید.
- دمای مورد نیاز را با کلیدهای  و  تنظیم کنید و کلید  را فشار دهید.
- دستگاه به دو حالت خودکار Auto و دستی Manual کار می‌کند.
- با فشار دادن کلید  حالت خودکار و دستی قابل تنظیم می‌باشد.
- در صورت نیاز به استفاده از حسگر حرارتی (کنترل دما با استفاده از پایش دمای بدن نوزاد) حسگر را روی شکم نوزاد وصل کرده و کلید  فشار دهید و Auto را انتخاب نمایید.
- پیشنهاد می‌گردد برای کنترل صحیح تر دما (جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد دما) حسگر پوستی را روی بدن (کبد نوزاد ترجیحا) قرار دهید.

! هشدارهای دستگاه

- اگر در مدار حسگر پوستی اختلالی بوجود آید، هشدار S.F فعال شده و سیستم گرمکن قطع می‌شود.
- اگر دمای بدن نوزاد بیش از ۳۹/۳ درجه سانتیگراد شود هشدار Overheat فعال می‌گردد.
- در صورت قطع برق هشدار صوتی فعال می‌گردد.
- هر نیم ساعت هشدار صوتی جهت بازدید نوزاد فعال می‌گردد که با فشار دادن کلید  هشدار غیر فعال می‌گردد.



هشدار

- فاصله گرمکن دستگاه تا نوزاد نباید کمتر از ۶۰ سانتیمتر باشد.
- با شل کردن پیچ گلوبی و یا باز کردن اهرم گلوبی (در دستگاه های جدید) این فاصله را تنظیم نمایید.
- از قرار دادن حسگر دمای پوستی در مقعد نوزاد اجتناب گردد.
- از چسب ضد حساسیت برای نصب حسگر بر روی پوست بدن نوزاد استفاده گردد.
- نظارت بر دمای بدن نوزاد به طور مستقل توسط پرستار ضروری می‌باشد.
- محفظه دستگاه بسیار گرم می‌باشد، از دست زدن به آن جدا خودداری نمایید.
- هیچگاه دستگاه را زیر تابش مستقیم نور خورشید و یا در مجاورت وسایل برودتی و گرمایشی قرار ندهید.
- دستگاه باید هر ۶ ماه یکبار سرویس و کالیبره گردد.