



خروجی اطمینان

اگر حجم تنفسی از حجم مورد نیاز بیمار بیشتر بوده و یا گرفتگی در مسیر راه هوایی رخ دهد، دریچه اطمینان باز شده و هوای اضافی را آزاد می‌کند. در این حالت هشداردهنده صوتی دستگاه به صدا در می‌آید.

حالت دستی برای اطفال زیر ۱۵ کیلوگرم و بیماران دارای لوله تراشه استفاده نشود (فقط برای CPR و با ماسک)



مراحل راه اندازی



۱ رگولاتور دستگاه را به کپسول اکسیژن متصل کنید (ترجیحاً بدون استفاده از آچار)

۲ شیر کپسول را باز کرده و با مشاهده گیج (عقربه) رگولاتور از شارژ بودن کپسول اطمینان حاصل نمایید.



۳ با چرخاندن دسته تنظیم حالت نحوه عملکرد را با توجه به نوع کاربرد انتخاب کنید:

- حالت دستی
- حالت اتوماتیک

حالت دستی (Manual): در این حالت از دکمه فشاری برای ایجاد هوای دمی استفاده نمایید. فلوی ثابت این دستگاه در این حالت ۴۰ لیتر بر دقیقه است (در هر ثانیه ۶۷۰ سی سی به بیمار حجم می‌دهد).

حالت اتوماتیک (Automatic): حجم و فرکانس تنفس بیمار توسط تنظیم کننده حالت اتوماتیک، تنظیم می‌گردد. در این حالت با فشردن قفل حالت اتوماتیک، با توجه به وزن بیمار بیشترین حجم را انتخاب کنید. هنگامی که صدای دریچه اطمینان شنیده شد، با کاهش حجم تنفسی به اندازه‌ای که صدای دریچه اطمینان دیگر ایجاد نشود، به بهترین تنظیم خواهید رسید.