


۶. تیوب را به دستگاه متصل نمایید.

۵. پس از انتخاب مود دستگاه از منوی قبلی و اتصال تیوب منوی ذیل جهت تنظیمات اینسپلیتور ظاهر می گردد:

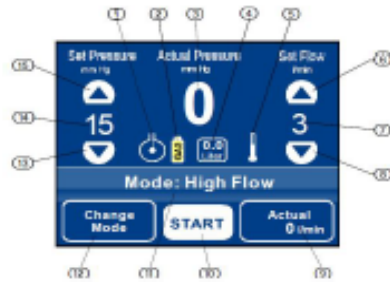

۱. نمایشگر روشن بودن سیستم ستیجش همزمان فشار داخل شکم (RTP)

۲. نمایشگر میزان گاز کیپول (سیز رنگه فشار بالای 30BAR در کیپول _ زرد رنگه فشار بین ۲۰ تا ۲۰ BAR در کیپول _ قرمز رنگه فشار زیر ۲۰ BAR در کیپول)

۳. نمایشگر فشار واقعی

۴. میزان گاز معرفی

۵. نمایشگر گرمایش گاز تحریقی

۶. افزایش فلو اسمی گاز

۷. نمایشگر فلو اسمی گاز

۸. کاهش فلو اسمی گاز

۹. نمایشگر فلو واقعی گاز

۱۰. استارت و استاپ جریان گاز

۱۱. نمایشگر مود و وضعیت دستگاه


۱۲. نمایشگر تغییر مود و وضعیت اینسپلیتور

۱۳. کاهش فشار اسمی

۱۴. نمایشگر فشار اسمی

۱۵. افزایش فشار اسمی

پنل جلویی

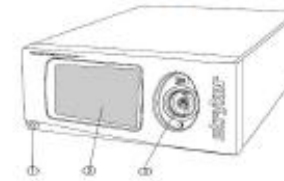

۱. دکمه خاموش و روشن
۲. صفحه لمسی
۳. محل اتصال تیوب اینسپلیتور

۴. پلیت نوع دستگاه

۵. پلیت مشخصات شرکت

۶. پورت SIDNE جهت ارتباط با تجهیزات اتاق عمل یکپارچه استرایکر

۷. پورت ارسال و دریافت اطلاعات


۸. اتصال زمین

۹. پورت اتصال به برق AC

۱۰. سیمه فیوز

۱۱. محل اتصال کیپول گاز

پنل پشتی

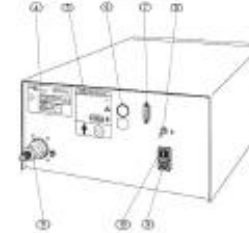

ست کیپولینگ و باتری

۱. کیپول گاز را به کنسول متصل نمایید.

۲. کنسول را روشن نمایید.

۳. بعد از بازگشایی نرم افزار سیستم منوی ذیل ظاهر می گردد:

