

## راهنمای استفاده از دستگاه مانیتور ARAD P10

### عملکرد کلید ها:

- Gain**  
دسترسی سریع جهت تنظیم Gain سیگنال ECG
- Lead**  
دسترسی سریع جهت تغییر Lead در سیگنال ECG
- Interval**  
تغییر فواصل زمانی اندازه گیری خودکار فشار غیرتهاجمی
-   
برای شروع و توقف اندازه گیری فشار غیرتهاجمی به کار می رود.
- IBP1 → 0 ←**  
برای دسترسی سریع جهت صفر نمودن IBP1 کاربرد دارد
- IBP2 → 0 ←**  
برای دسترسی سریع جهت صفر نمودن IBP2 کاربرد دارد
- Local**  
برای پرینت سیگنال به صورت Local مورد استفاده قرار می گیرد.
- Limits**  
جهت دسترسی سریع به صفحه Alarm
- Silence**   
برای توقف آلام صوتی به مدت ۲ دقیقه و فعال کردن مجدد آن.
- Mute All**   
جهت غیرفعال کردن تمامی آلام های صوتی به جز آلام APNEA
- Disclosure**  
برای نمایش سیگنال ECG ذخیره شده به کار می رود.
- Trends**   
نمایش صفحه مربوط به نمودار پارامترهای دستگاه در ۹۶ ساعت گذشته


View 


برای تغییر چینش سیگنال ها و پارامترهای صفحه نمایش استفاده می گردد.


Freeze 


شروع و توقف ثابت نگه داشتن (فریز کردن) سیگنال های ترسیم شده


## هشدارها:


 جهت آگاهی از سایر عملکردهای دستگاه به راهنمای کامل دستگاه مراجعه نمایید.

 هنگام جدا نمودن تجهیزات جانبی از دستگاه، مخصوصاً سنسور SPO2 کابل مربوطه را نکشید و با احتیاط با آزاد کردن ضامن های تعبیه شده تجهیزات را از دستگاه جدا نمایید.

 در صورت اتصال مداوم دستگاه به برق شهر، حداقل یک بار در هفته برق را از دستگاه قطع نمایید تا دستگاه با باتری شارژ شده کار کند و هنگام مشاهده آلام Low Battery، برق را مجدداً به دستگاه متصل نمایید تا طول عمر مفید باتری داخلی دستگاه بیشتر گردد.

 فقط از لوازم جانبی مخصوص دستگاه که با آرم شرکت صایران مشخص شده اند جهت اتصال به دستگاه استفاده نمایید تا منجر به خرابی دستگاه نگردد.

 جهت تمیز کردن صفحه نمایش، استفاده از مقدار بسیار کمی آب برای مرطوب نمودن دستمال نخی کافی است و به هیچ وجه نباید از محلول حاوی شیشه پاک کن یا الکل استفاده شود.

 در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه، جهت انجام خدمات پس از فروش و ارتباط با مرکز CRM شرکت الکترواپتیک صایران، با تلفن های ۰۳۱ ۳۴۵۲۰۳۳۰-۳۱ تماس حاصل فرمایید.